

歯列矯正用バンドの合着に 光重合型接着材

オーソバンドペーストLC



■1ペーストタイプ

- 混和不要の1ペーストタイプのため、直接歯列矯正用バンドにペーストを塗布することができます。
- 容易に塗布しやすいペースト性状です。

■光重合型

- 光照射するまでは、ペーストの塗布時間およびセッティング時間に余裕があります。
- 光照射により硬化し余剰ペーストの除去を行うことができますので、作業時間を短縮します。

■ブルーペースト

- 歯質との識別が容易のため、余剰ペーストの除去および歯列矯正用バンドの取り外し後の接着材の除去を容易にします。

■フッ素徐放性

■不快なおいや後味がありません




歯列矯正用バンドの合着に 光重合型接着材


オーソバンドペーストLC

オーソバンドペーストLCの親水性成分は、レジンとグラスアイオノマー技術を結合し、独自のフッ素徐放性コンポマーを形成します。


ご使用方法

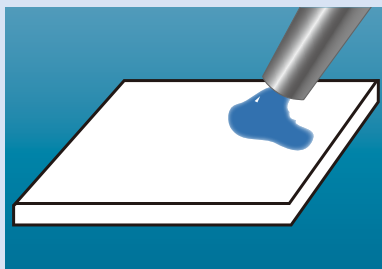


ミキシングパッド上に、
本材を所要量採り、直ちに、
キャップを閉めます。

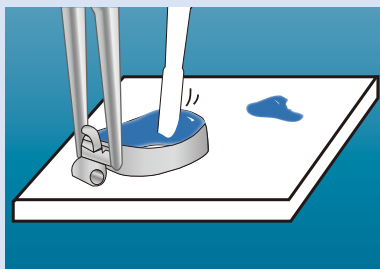


バンドの内面に本材を塗布
します。

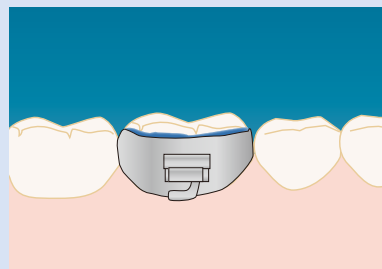


バンドを所定の位置にて
装着し、固定させます。

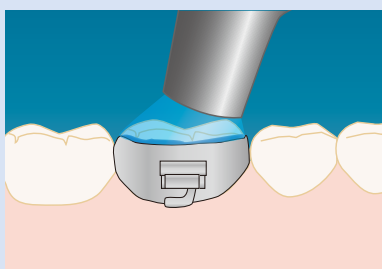

咬合面側からペーストを
10秒間（500mW/cm²）
光重合します。

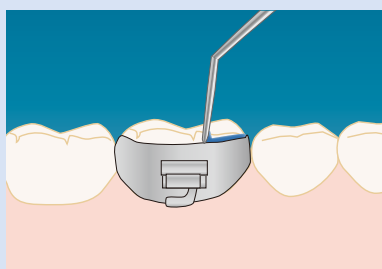

硬化した余剰ペーストを
除去します。

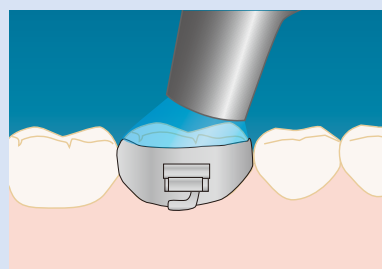

咬合面側から、更に20
秒間（500mW/cm²）、あ
るいは硬化を確認するま
で、光重合します。



オーソバンドペーストLC 5g × 2本入

内容

オーソバンドペーストLC 5g 1本
スパチュラ 2本
ミキシングパッド 1冊

×2袋

医療機器認証番号: 225AGBZX00080000

管理医療機器

高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材(31750002)

製造業者: BISCO, Inc. (ビスコ インク社)

製造国: アメリカ合衆国 (USA)

販売元



株式会社ミツバオーソサプライ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨2-16-4メゾンカタヤマ2F

TEL. 03-3949-0066 FAX. 03-3949-0090

URL <http://www.mitsuba-ortho.com>

製造販売元: 株式会社モリムラ
〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-28-10-3F
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351